



D.E.R.M.

מסכה להקלה במצבים של עין יבשה

הוראות שימוש

לקבלת תוצאות מיטביות, לפני השימוש במסכה, יש לנקות את העפעפיים והפנים באמצעות חומר ניקוי ייעודי (מומלצים אלה המבוססים על שמן עץ התה).

טיפול המשלב חום ולחות להקלה מידית בתופעות עין יבשה

קומפרס חם בשילוב פד כותנה לח

השימוש במסכת D.E.R.M. לקומפרס חם בשילוב עם פד כותנה לח מסייע בליחוח אזור הטיפול בעפעפיים, ונועד להשגת תוצאה מרבית בהקלה בתופעות של עין יבשה ונפיחות בעפעפיים (Puffy eyes)

1. הרטב את פד הכותנה במים. סחוט מים עודפים עד לכדי לחות קלה.
2. מקם את הפד הלח על גבי צידה הפנימי של מסכת D.E.R.M.
3. מקם את מסכת D.E.R.M. עם הפד הלח על גבי מגבת נייר וחמם במיקרוגל בעוצמה הגבוהה ביותר לפי ההנחיות הבאות:
 - a. במיקרוגל 500Watt - 25 שניות
 - b. במיקרוגל 1000Watt - 20 שניות
 - c. במיקרוגל 1500 Watt - 15 שניות
4. בדוק את הטמפרטורה בעזרת האצבעות. אם המסכה חמה מדי למגע, חכה דקה ונסה שוב. ברגע שהטמפרטורה נעימה למגע, מקם בעדינות את המסכה על העיניים. ניתן לאבטח את מיקום המסכה באמצעות הרצועה. הנח את המסכה על העפעפיים במשך 7-9 דקות או לפי הנחיות רופא העיניים.

קומפרס חם בלבד (ללא פד כותנה)

טיפול פשוט להקלה מידית חמנית בתופעות עין יבשה ועפעפיים נפוחות.

1. עקוב אחר צעדים 3-4 ללא שימוש בפד הכותנה הלח.
2. הנח את המסכה על העפעפיים למשך 4-6 דקות.

קומפרס קר

טיפול טבעי בתסמיני אלרגיה, מיגרנות ולחץ בסינוסים.

1. הכנס מסכת D.E.R.M. לשקית פלסטיק אטומה.
2. הנח בפריזר למשך 30 דקות.
3. הסר את שקית הפלסטיק והנח את המסכה על העיניים למשך 5-7 דקות או לפי הנחיות רופא עיניים.

משווק בלעדי בישראל-חברת אלפא נטו בע"מ